



Sanitas SBM 36

Fehlerbehebung

Bei Fehlern erscheint auf dem Display die Fehlermeldung **E_**.

Folgende Fehlermeldungen können auftreten:

1. **E1**
Der Puls konnte nicht erfasst werden.

2. **E2**
Während der Messung wurde gesprochen oder es wurde sich bewegt.

3. **E3**
Die Manschette wurde zu stark bzw. zu schwach angelegt.

4. **E4**
Fehler während der Messung.

5. **E5**
Der Aufpumpdruck ist höher als 300mmHg.

6. **E6**
Die Batterien sind fast verbraucht.

Wiederhole in diesen Fällen die Messung. Achte darauf, dass der Manschettenschlauch ordnungsgemäß eingesteckt ist und du dich nicht bewegst oder sprichst.

Setze gegebenenfalls die Batterien neu ein oder ersetze diese.